


## Il existe plusieurs façons de brancher la base (émetteur / chargeur) sur la télévision :

- 1) **UN BRANCHEMENT DIRECT SUR LES PRISES AUDIO QUI SE TROUVENT DERRIÈRE LA TÉLÉVISION LORSQUE CELLES-CI SONT DISPONIBLES :**

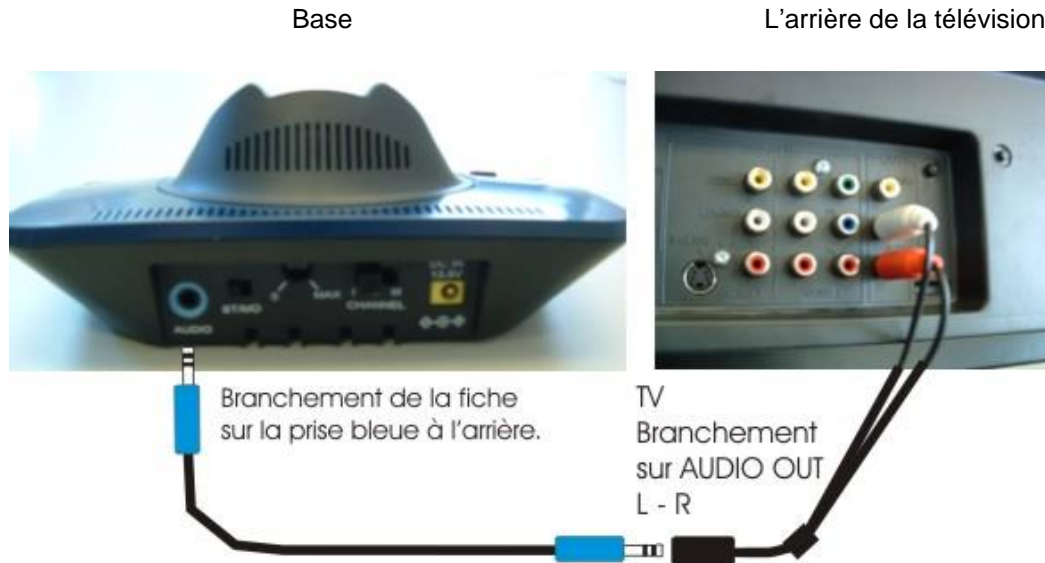

**Très important** : Derrière la télévision, vous devez utiliser les prises RCA (la prise blanche et rouge) avec l'indication **OUT** ou **AUDIO OUT** sur la télévision.

Dans la boîte, il y a les câbles nécessaires pour faire les branchements. Ne pas oublier de brancher l'adaptateur mural à la prise jaune derrière la **base** de votre système TV.

**Information importante** : Certaines télévisions possèdent des sorties audio avec un niveau sonore qui varie avec le volume de la télévision. Si c'est le cas, vous devez toujours ajuster le volume de la télévision à un niveau « normal » et compenser le niveau du son avec l'utilisation du volume sur votre système d'écoute (la roulette sur votre récepteur). Par exemple, il faut ajuster le son comme si une autre personne écoutait la télévision avec vous (1/4 de son).

Si après quelques minutes d'utilisation, le son de la télévision coupe dans vos écouteurs, vous entendez des « bips » ou la petite lumière verte dans le bas de la base (émetteur / chargeur) est éteinte, ceci indique que le son en provenance de votre télévision ou autres sources n'est pas suffisamment élevé. Vous devez alors monter un peu plus le son avec la télécommande de votre télévision ou de la source du son. Lorsque le son sera suffisamment élevé, la lumière verte devrait s'allumer. Si la lumière verte ne s'allume toujours pas ou s'éteint après quelques minutes d'écoute, augmenter à nouveau votre son avec votre télécommande. Si rien ne se produit, vous pouvez réactiver l'écoute en appuyant sur la touche avec le symbole (en forme d'oreille) qui est sur la base.

## 2) UTILISATION AVEC UN DÉCODEUR NUMÉRIQUE.

Utilisez le décodeur numérique, lorsque la télévision ne possède pas de sortie **AUDIO OUT**, ce qui est souvent le cas sur les anciennes télévisions ou sur les **télévisions HD** qui possèdent seulement des sorties **audio NUMÉRIQUES**.


Vous pouvez faire le branchement sur les prises RCA audio (**blanche et rouge**) du décodeur numérique, si celles-ci sont disponibles.

### Avantage :

Avoir du son, même si la télévision est fermée (Ex : écoute de la musique).


### Désavantage :

Le son en provenance d'un DVD ou Blu-ray n'est pas reproduit par les écouteurs.

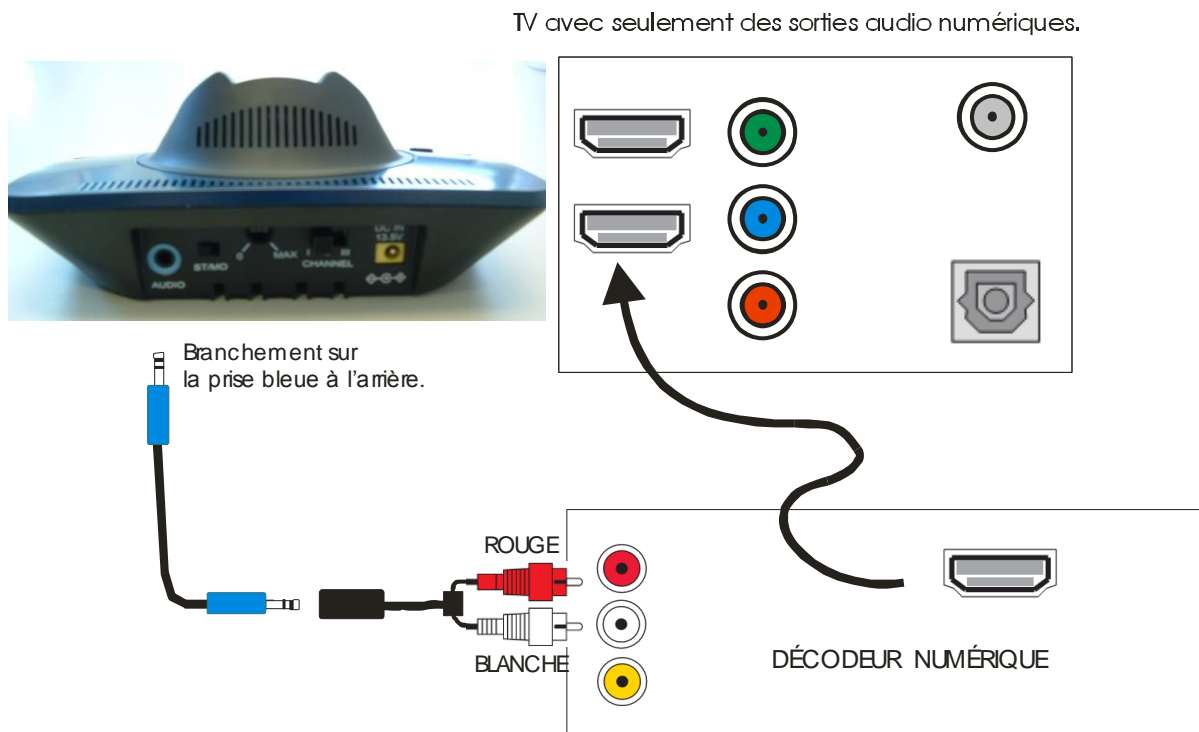

### 3) UTILISATION AVEC UNE TÉLÉVISION QUI POSSÈDE UNE PRISE POUR ÉCOUTEUR OU AUDIO EN FORMAT 1/8 ". (REPRÉSENTÉ PAR UN SYMBOLE D'ÉCOUTEUR SUR LA TÉLÉVISION)

Il arrive que certaines télévisions **ne possèdent pas de prise RCA AUDIO OUT**. Cependant, elles peuvent posséder une petite prise audio indiquée **AUDIO OUT ANALOGIQUE**. Si c'est le cas, vous pouvez brancher le câble bleu directement dans cette prise.

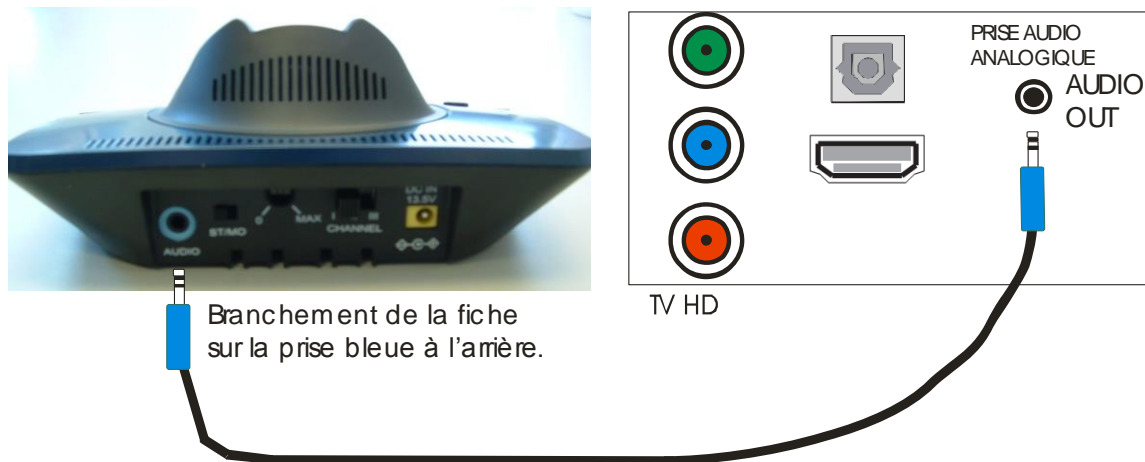


Ce branchement, dans certains cas, coupe le son des haut-parleurs de la télévision. **Si c'est le cas** et que vous voulez avoir du son sur les haut-parleurs de la télévision, utilisez le microphone fourni dans la boîte comme démontré à l'exemple numéro 4 ou branchez le système dans le décodeur, si vous en avez un comme démontré à l'exemple numéro 2.

Certaines télévisions possèdent une sortie audio avec un niveau sonore qui varie avec le volume de la télévision. Si c'est le cas, vous devez toujours ajuster le volume de la télévision à un niveau « normal », et compenser le niveau du son avec l'utilisation du volume sur votre système d'écoute (la roulette sur votre récepteur). Par exemple, il faut ajuster le son comme si une autre personne écoutait la télévision avec vous.

Si après quelques minutes d'utilisation, le son de la télévision coupe dans vos écouteurs, vous entendez des « bips » ou la petite lumière verte dans le bas de la base (émetteur / chargeur) est éteinte, ceci indique que le son en provenance de votre télévision ou autres sources n'est pas suffisamment élevé. Vous devez alors monter un peu plus le son avec la télécommande de votre télévision ou de la source du son. Lorsque le son sera suffisamment élevé, la lumière verte devrait s'allumer. Si la lumière verte ne s'allume toujours pas ou s'éteint après quelques minutes d'écoute, augmenter à nouveau votre son avec votre télécommande. Si rien ne se produit, vous pouvez réactiver l'écoute en appuyant sur la touche avec le symbole (en forme d'oreille) qui est sur la base.

- 4) **SI VOUS N'AVEZ PAS DE PRISE AUDIO OUT DERRIÈRE VOTRE TÉLÉVISION, NI DE DÉCODEUR NUMÉRIQUE, UN PETIT MICROPHONE DOIT ÊTRE BRANCHÉ SUR LA BASE (ÉMETTEUR / CHARGEUR) (PRISE BLEUE) ET FIXÉ VIS-À-VIS DU HAUT-PARLEUR DE LA TÉLÉVISION AVEC LE VELCRO AUTOCOLLANT. IDÉALEMENT, S'IL Y A DES HAUT-PARLEURS DERRIÈRE VOTRE TÉLÉVISION, FIXER LE MICROPHONE À CET ENDROIT.**

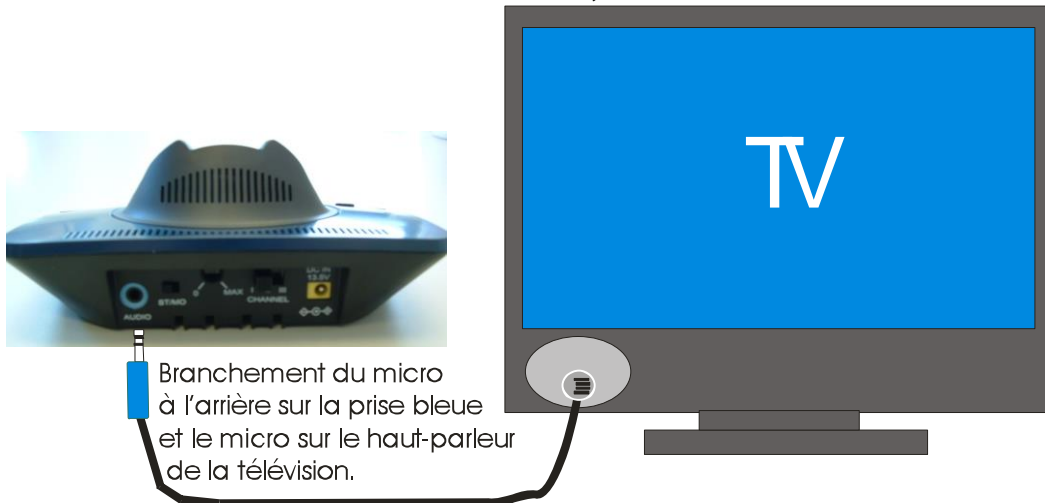

#### **Information importante :**

Lorsque le petit micro est fixé vis-à-vis du haut-parleur de la télévision, vous devez ajuster le volume de votre télévision à une position d'écoute « normale » et compenser le niveau sonore à l'aide du volume de votre système d'écoute (roulette du récepteur).

Par exemple, il faut ajuster le son de la télévision comme si une autre personne écoutait la télévision avec vous.

Si après quelques minutes d'utilisation, le son de la télévision coupe dans vos écouteurs, vous entendez des « bips » ou la petite lumière verte dans le bas de la base (émetteur / chargeur) est éteinte, ceci indique que le son en provenance de votre télévision ou autres sources n'est pas suffisamment élevé. Vous devez alors monter un peu plus le son avec la télécommande de votre télévision ou de la source du son. Lorsque le son sera suffisamment élevé, la lumière verte devrait s'allumer. Si la lumière verte ne s'allume toujours pas ou s'éteint après quelques minutes d'écoute, augmenter à nouveau votre son avec votre télécommande. Si rien ne se produit, vous pouvez réactiver l'écoute en appuyant sur la touche avec le symbole (en forme d'oreille) qui est sur la base.


Si les écouteurs produisent un « cillement » ou un retour de son, il se peut que ce problème soit relié aux écouteurs qui fonctionnent avec le volume très élevé. Le son des écouteurs est capté par le petit micro sur la télévision. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez essayer de corriger le problème en plaçant le petit micro à l'arrière de la télévision, s'il y a des haut-parleurs. Sinon, vous pouvez utiliser vos prothèses avec les écouteurs à un volume moins élevé sur la roulette du récepteur.

**5) LA TÉLÉVISION POSSÈDE SEULEMENT DES PRISES NUMÉRIQUES ET AUCUN DES AUTRES BRANCHEMENTS SERAIENT FONCTIONNELS?**

Nous retrouvons cette configuration sur certaines télévisions à haute définition qui ont été conçues pour être branchées sur un système de son avec des entrées numériques.

**Il ne sera pas possible** de brancher la base (émetteur/ chargeur) directement sur la télévision. **Un moyen simple** : Utilisez le petit micro fourni comme dans l'exemple démontré au numéro 2 ou faire l'achat d'un module qui converti le son numérique en son analogique. Ce type de module est disponible chez des marchands spécialisés.

Voici un *exemple* d'installation.

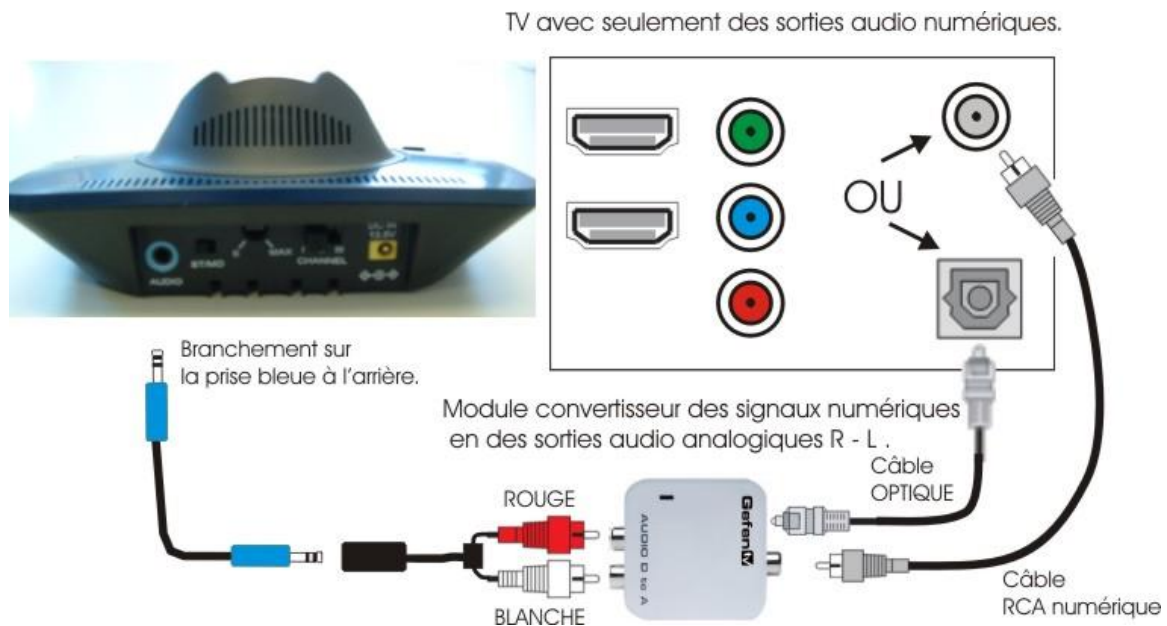

**Important !**

**L'installation du convertisseur doit se faire par un technicien ou une personne qui connaît bien ce type d'équipement.**

**Le centre de réadaptation InterVal se dégage de toute responsabilité face à des bris ou des problèmes de fonctionnement suite à des branchements mal effectués.**